



phagifit – Nutzungsinformationen für Therapeut*innen

Stand: April 2025

Herzlich willkommen in der App phagifit!

Vielen Dank für Ihr Interesse, digitale Lösungen in Ihren Behandlungsprozess zu integrieren. Mit der App phagifit möchten wir Patient*innen in Ihrem häuslichen Eigentaining unterstützen und gleichzeitig für Sie als Therapeut*innen den Organisations- und Kopieraufwand bei der Übermittlung geeigneter Übungsinhalte reduzieren.

Wie Sie schon wissen, nutzen Sie die App phagifit gemeinsam mit Ihrem Patienten / Ihrer Patientin und können geeignete Übungsinhalte für das häusliche Eigentaining freischalten.

Die Inhalte umfassen **restituierende, kompensatorische und adaptive Maßnahmen**.

Mit phagifit möchten wir die Patient*innen in Ihrem häuslichen Eigentaining unterstützen und ihnen ermöglichen, selbst zum Experten / zur Expertin im Umgang mit Ihrer Dysphagie zu werden. Wir möchten Patient*innen helfen, die Übungen, die sie in der Präsenztherapie kennenlernen, auch zuhause gut umsetzen zu können. Die Übungsvideos, die über die App phagifit übermittelt werden, sollen so gut wie möglich die Therapiesituation imitieren, sodass Patient*innen auch zuhause eine therapeutische „Stimme“ im Ohr haben, die ihnen genau erklärt, wie die Übungen durchzuführen sind.

Hier möchten wir Ihnen nun genau erklären, wie Sie die App phagifit nutzen und bedienen können.

Wechsel zur Therapeut*innenoberfläche

Wenn Sie die App öffnen, sehen Sie sie zuerst so, wie Patient*innen sie auch sehen.

Zum Wechsel zur Therapeut*innen-Oberfläche klicken Sie bitte auf die graue Schaltfläche oben „Zur Therapeutenansicht wechseln“.

Funktion: Patient*in einladen

Hier haben Sie die Möglichkeit, einen Patienten / eine Patientin zur gemeinsamen Nutzung einzuladen. Der Patient / die Patientin muss sich hierfür die App im App-Store herunterladen und die dreimonatige Patient*innenlizenz erwerben. Der hier angezeigte Code ist für Ihren Praxis-

Account personalisiert und Sie können ihn direkt an Ihren Patienten / Ihre Patientin weiterleiten. Mithilfe dieses Codes kann der Patient / die Patientin sich dann ganz einfach mit Ihrem Account verknüpfen. Der Code gilt für sämtliche Patient*innen, die Sie verknüpfen möchten.

Patient*innenübersicht

Unter dem Einladungsbutton sehen Sie dann die Übersicht der Patient*innen, die bereits mit Ihrem Account verknüpft sind.

Ganz oben sehen Sie immer sich selbst als Patientin, sozusagen als Beispiel. Dieses Beispielprofil soll Ihnen ermöglichen, die Funktionalitäten von phagifit vollständig auszuprobieren und nachvollziehen zu können, wie sich die App-Nutzung für Ihre Patient*innen anfühlt.

Funktion: Übungsinhalte freischalten

Wenn Sie auf einen Patienten / eine Patientin klicken, haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Übungsplan zu erstellen, d.h. Übungsinhalte freizuschalten. Sie können hierfür in der oberen Leiste die Bereiche Restituierende, Kompensatorische und Adaptive Maßnahmen auswählen. In der unteren Leiste sehen Sie dann Spezifikationen, z.B. sind die Restituierenden Maßnahmen nach den einzelnen Schluckphasen gegliedert; die Kompensatorischen Maßnahmen umfassen Schlucktechniken, Haltungs-veränderungen und Übungen bzw. Anleitungen aus der Rubrik Atmung und Schutzfunktionen.

Für jeden Bereich können Sie dann entsprechende Übungsvideos auswählen und freischalten. Sie können sich das Video vorher selbst anschauen, indem Sie auf das Auge rechts neben dem Übungstitel klicken. Über einen Klick auf das Papiersymbol können Sie zusätzlich eine kurze Beschreibung des Videos lesen. Über einen Klick auf das Kamerasymbol können Sie Ihre eigene Handykamera aktivieren. Diese Funktion können Patient*innen nutzen, um ihre eigene Bewegungsausführung direkt mit dem Vorbild im Übungsvideo zu vergleichen.

Zum Freischalten wählen Sie nun geeignete Videos aus.

Ein Klick auf das Notizsymbol neben dem Videotitel / Vorschaubild erlaubt Ihnen, eine individuelle Notiz für Ihre Patient*innen hinzuzufügen. Dies kann z.B. eine individuelle Angabe zur Übungsfrequenz sein, ein individueller Hinweis zur Übungsanpassung oder eine individuelle Empfehlung, in welchem Rahmen eine bestimmte Schlucktechnik angewendet werden soll.

Achten Sie darauf, direkt aus jedem für Ihren Patienten / Ihre Patientin in Frage kommenden Bereich (Restituieren / Kompensatorische / Adaptiv) Videos auszuwählen. Die Auswahl in einem Bereich bleibt gespeichert, wenn Sie in einen anderen Bereich wechseln. Erst wenn Sie alle Videos aus allen Bereichen ausgewählt haben, klicken Sie auf Freischalten. Die Videos werden dann automatisch auf den Account Ihres Patienten / Ihrer Patientin übertragen.

Erläuterung speziell zu den Adaptiven Maßnahmen:

Hier haben Sie die Möglichkeit, separat Empfehlungen zur Konsistenzanpassung für die Kategorien Nahrung und Flüssigkeiten auszuwählen sowie zum Schlucken von Tabletten. Der Klick auf das Auge zeigt Ihnen die Empfehlung, wie Sie später auch von den Patient*innen gesehen wird.

Sie haben zudem die Möglichkeit, eigene individuelle Empfehlungen hinzuzufügen. Diese erscheinen dann in der jeweiligen Kategorie, die Sie der Empfehlung zugeordnet haben, also z.B. Flüssigkeiten, und Sie können Sie dann freischalten.

Unter „Verlauf“ sehen Sie dann sämtliche Übungspläne, die Sie bislang für den jeweiligen Patienten / die Patientin freigeschaltet haben.

Individuelle Anpassungen im Rahmen der therapeutischen Verantwortung

Ein wichtiger Hinweis: Auf genaue Angaben zu Anzahl der Übungswiederholungen, Haltedauer von verschiedenen Übungen etc. wurde bewusst verzichtet, um der Heterogenität der Symptomatik und der Patient*innenklientel zu entsprechen.

Somit obliegt es Ihnen im Rahmen Ihrer therapeutischen Verantwortung, ggf. Hinweise zur individuellen Anpassung der Übungen zu geben (s.o., über einen Klick auf das Notizsymbol). Ebenso ist es natürlich Ihre Aufgabe im Rahmen der Nutzung von phagifit, nur solche Übungsinhalte freizuschalten, die aus therapeutischer Sicht für Ihren Patienten / Ihre Patientin geeignet sind und zum aktuellen Stand der Therapie passen. Dies betrifft insbesondere die unter den Adaptiven Maßnahmen freischaltbaren diätetischen Empfehlungen, aber natürlich auch andere Übungsinhalte.

Wissensartikel

Unter Wissen finden Sie Artikel mit Hintergrundinformationen und praxisnahen Tipps zum Thema Dysphagie speziell für Therapeut*innen. Die Hinweise sollen Sie bei der Gestaltung ihres Therapieangebots unterstützen und Ihnen mehr Sicherheit in der Durchführung der Dysphagietherapie geben.

Profil

Unter Profil können Sie auf Ihr App-Konto zugreifen, und sich nach Nutzung der App abmelden. Im Bereich Benachrichtigungen können Sie einstellen, wann und wie häufig Sie automatisierte Übungserinnerungen auf Ihr Handy oder Tablet erhalten möchten. Diese Funktion ist primär für Patient*innen gedacht. Sie können die Benachrichtigungen selbstverständlich auch deaktivieren. Auch haben Sie die Möglichkeit, sich dieses Einführungsvideo immer wieder anzusehen, wenn sich Fragen zur Nutzung der App ergeben.

Wechsel zur Patient*innenoberfläche

Wenn Sie in dem Tab „Patient*innen“ sind, sehen Sie unter ihrem eigenen Beispielprofil die Option „Zur Patientenansicht wechseln“. Wenn sie hierauf klicken, landen Sie automatisch auf der Oberfläche, welche die Patient*innen sehen. Das heißt, Sie können hier nachempfinden, wie sich die App-Nutzung für Ihre Patient*innen anfühlt.

In Ihrem Fall als Therapeut / Therapeutin sehen Sie hier nun die Übungen, die Sie für sich selbst als Beispielpatient*in freigeschaltet haben. „Echte“ Patient*innen sehen hier die Inhalte, die Sie als Therapeut*in für diese freigeschaltet haben.

Die Wissensinhalte, also Informationsartikel, auf der Patient*innenoberfläche unterscheiden sich von denen auf der Therapeut*innenoberfläche.

Oben haben Sie in grau hinterlegt dann jederzeit die Option, wieder zurück zu Ihrer Therapeut*innenoberfläche zu wechseln, um Übungen freizuschalten.

Lizenzinformationen (nach Testphase)

Ihre Lizenz ist für sechs Monate gültig. Nach Ablauf der sechs Monate erhalten Sie über die App einen Hinweis, wie Sie eine neue Lizenz erwerben und Ihre Accountdaten bestehen lassen können.

Vielen Dank für die Nutzung von phagifit. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge haben, freuen wir uns sehr, wenn Sie sich über kontakt@phagifit.de an uns wenden. Über die Website www.phagifit.de finden Sie noch weiterführende Informationen und Kontaktmöglichkeiten.

Vielen Dank, und viel Freude und Erfolg bei der Nutzung von phagifit in der Dysphagietherapie. Wir hoffen sehr, Sie dabei unterstützen zu können, Ihren Patient*innen eine optimale, ganzheitliche Behandlung zukommen zu lassen, welche auch in den Alltag der Patient*innen hineinwirkt. Auch hoffen wir, Ihnen als Therapeut / Therapeutin etwas vom Organisations- und Kopieraufwand abzunehmen, der ansonsten bei der Bereitstellung geeigneter individueller Therapieaufgaben entsteht. Nicht zuletzt hoffen wir, Ihnen hilfreiche Tipps zur Gestaltung Ihrer therapeutischen Arbeit geben zu können und freuen uns hier jederzeit über fachlichen Austausch.

Vielen Dank.